

パーツ交換手順の一例 【見本、使用禁止】

3) パーツ交換



3) - 1. 内部アクセス1(トップカバー)

本体を平らな場所に置き、耐圧ホースを取り外す。AC ケーブルは電源から抜いておく。


電源ケーブルを外す。

バックパネルのネジ(4本)を外す。

本体のサイドパネル下部のネジ(3本×左右)を外す。

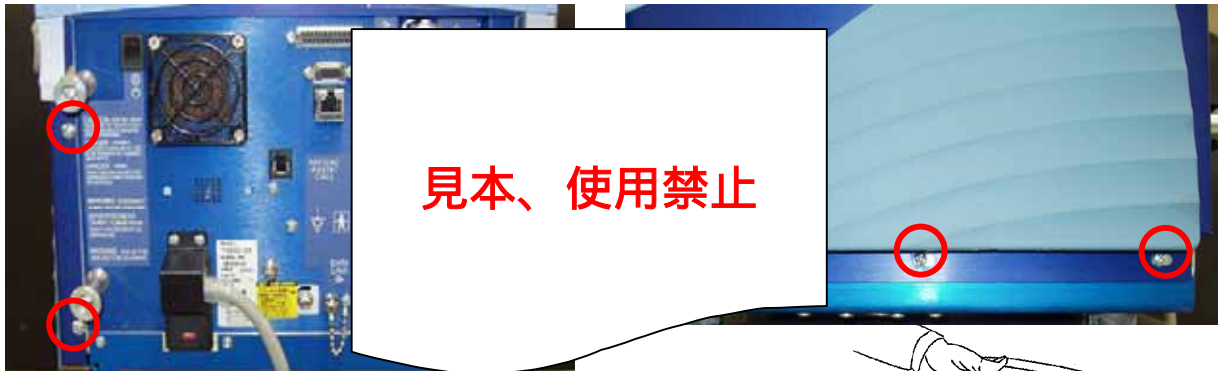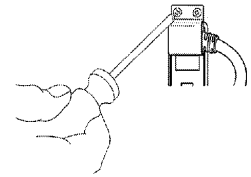

本体の後方へトップカバーを滑らせて持ち上げる。

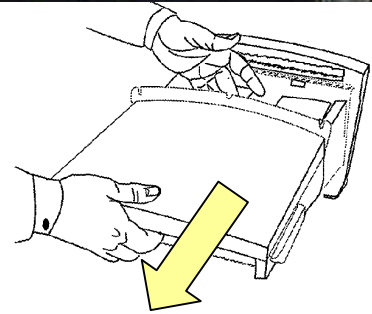

(注意)

カバーを外す際に、SVGA 出力リボンケーブルを傷つけないように注意すること。カバーを後ろに滑らせる前に、カバーがこのケーブルに触れないことを確かめること。