

類別 機械器具 06 呼吸補助器

管理医療機器 一般的名称 加温加湿器 JMDN 70562000

販売名 「F&P 410 型 加温加湿器」の付属品(エアウェイサーモメータ 900MR033)

【警告】

使用方法

- ◆エアウェイサーモメータが吸気側に正しく、かつ安全に設置されていることを確認してください。正しく設置されていない場合患者さんへ送られたガスの温度が高くなり、気道熱傷の可能性があります。
- ◆患者さんに装着する前に、加温加湿器が正常動作することを使用前点検で確かめてください。

【禁忌・禁止】


使用方法

再使用しないでください。

【形状・構造及び原理等】

1. 構成

エアウェイサーモメータ、添付文書

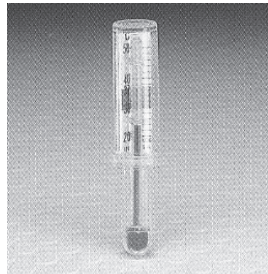

【使用目的、効能又は効果】

呼吸回路の温度を測定するために使用されます。

【操作方法又は使用方法等】

1. 呼吸回路への組み立て

呼吸回路の吸気側の中央まで、しっかりと押し込んでください。

2. 操作中の点検

- ①患者さんへの吸入ガス温度を適宜確認してください。
- ②呼吸回路および吸入温度モニタ用の温度プローブが、外部の機器(輻射熱方式のウォーマ、保育器、他の加熱装置等)から影響を受けていないことを確かめてください。温度プローブはインキュベータの外に置いてください。
- ③チャンバに手をあて、温かいことを確認してください。温かくない場合、加温・加湿が不足する可能性があります。
- ④分泌物の状態が正常であることを確認してください。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

- ◆熟練した方が使用してください。
- ◆病院の感染防止のためのガイドラインに沿って、交換してください。
- ◆ご使用になる前に、添付文書を良くお読みになってください。この添付文書、および併用される機器の取扱説明書の指示事項を守ってご使用ください。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

保管温度: -10~+50℃

保管相対湿度: 10~90%(非結露)

【保守・点検に係る事項】

1. 使用者による保守点検事項

ディスプレイはゼロです。使用後は廃棄してください。

【包装】

1個/袋

【主要文献及び文献請求先】

**アイ・エム・アイ株式会社 人工呼吸器部

**住所: 〒343-0824 埼玉県越谷市流通団地3-3-12

**TEL: 048-968-4442

E-mail: support@imimed.co.jp

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者の名称: アイ・エム・アイ株式会社

住所: 〒343-0824 埼玉県越谷市流通団地3-3-12

TEL: 048-988-4411(代)

**製造業者名(国名):

製造元: Fisher & Paykel Healthcare Limited

(フィッシャー アンド パイケル ヘルスケア社)

(ニュージーランド)

製造所: Fisher & Paykel Healthcare Limited

(フィッシャー アンド パイケル ヘルスケア社)

(ニュージーランド)