

類別 機械器具 06 呼吸補助器
管理医療機器 一般的名称 加温加湿器 JMDN 70562000

販売名 「F&P MR700 シリーズ型 加温加湿器」の付属品
(ホースヒータ)

【警告】

使用方法

- ◆患者さんに装着する前に、加温加湿器・ベンチレータが正常作動し、患者さんへの換気も正常に行われることを使用前点検で確認してください。
- ◆ディスプレイケーブルにホースヒータを挿入しないでください。
- ◆患者さんへの火傷を防止するため、ホースヒータ・呼吸回路が患者さんの皮膚に触れないように注意してください。
- ◆フェノール(5%以上)、ケトン系溶剤、ホルムアルデヒド、ハイポクロライト、塩酸化炭化水素、芳香族炭化水素、無機酸、第四アンモニウム化合物を消毒・洗浄・滅菌には使用しないでください。これらの薬剤は、部品に亀裂を起こす可能性があります。

【形状・構造及び原理等】

1. 構成

ホースヒータ、添付文書

2. 原理

フィッシャー アンド パイケル ヘルスケア社製加温加湿器からの電源により、蛇管内を通過するガスを加温し、ガス中の水分が蛇管内に結露することを防止します。



【使用目的、効能又は効果】

フィッシャー アンド パイケル ヘルスケア社製加温加湿器が使われている呼吸回路の結露を防止するために使用されます。

【操作方法又は使用方法等】

1. 組み立て

- ①組立前に、ホースヒータ(の絶縁)に損傷の無いことを確認してください。特に、ループ状となっている部分とコネクタ部分は注意して点検してください。何らかの損傷が見られる場合、使用しないでください。
- ②ドローワイヤにとがった部分が無いことを確認してください。フック部分を先端にして、ドローワイヤを蛇管に通してください。
- ③ドローワイヤにホースヒータをひっかけてください。ドローワイヤをゆっくりと引っ張り、ホースヒータをゆっくりと蛇管に通してください。ホースヒータのハウジング(プラスチック部分)が蛇管に触れる直前で、ドローワイヤを引くことを止めてください。
注意:ドローワイヤを使って、ハウジングと蛇管に触れさせないでください。



- ④ドローワイヤを前に少し押し、フックからホースヒータを外してください。
- ⑤ハウジングと蛇管を手で接続してください。
- ⑥700シリーズ加温加湿器との電気的接続には電気リカルアダプタ(900MR558)が必要です。呼吸側蛇管にもホースヒータを使う場合電気リカルアダプタ(900MR556)が必要です。電気リカルアダプタをホースヒータと加温加湿器に接続してください。



2. 操作方法

フィッシャー アンド パイケル ヘルスケア社製加温加湿器の取扱説明書を参照してください。

【使用上の注意】

*** 重要な基本的注意**

- ◆正しい長さのホースヒータが蛇管に挿入され、蛇管の中で真っ直ぐになっていること、蛇管の中で束になっていないことを確認してください。蛇管は再使用したりオートクレーブ後に縮むことがあります。必要に応じてホースヒータが入った状態で、蛇管を丁寧にストレッチしてください。
- ◆一旦、蛇管にホースヒータを組み込んだ場合、必要でないかぎり、蛇管からホースヒータを抜かないでください。
- ◆熟練された方が使用してください。
- ◆病院の感染防止のためのガイドラインに沿って消毒・滅菌・交換してください。
- ◆ご使用になる前に、添付文書を良くお読みになってください。この添付文書、および併用される機器の取扱説明書の指示事項を守ってご使用ください。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

1. 貯蔵・保管方法

保管温度: -10~+50℃

保管相対湿度: 10~90%(非結露)

2. 有効期間または使用の期限[製造業者認証]

ホースヒータ: 2年

【保守・点検に係る事項】

1. 使用者による保守点検事項

<滅菌・消毒>

EOG(55℃)可能、薬液(2%グルタルアルデヒド)、オートクレーブ(136℃@31.9psi、4分、又は120℃@13.9psi、15分)、パストツール殺菌
注意: ひび割れを防止するため、滅菌・消毒・洗浄の前に、他のリユーズラブルパーツと切り離しておいてください。

【包装】

1本/袋

【主要文献及び文献請求先】

- ** アイ・エム・アイ株式会社 人工呼吸器部
- ** 住所: 〒343-0824 埼玉県越谷市流通団地3-3-12
- ** TEL: 048-968-4442
- E-mail: support@imimed.co.jp

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売の名称: アイ・エム・アイ株式会社

住所: 〒343-0824 埼玉県越谷市流通団地3-3-12

TEL: 048-988-4411(代)

**** 製造業者名(国名):**

製造元: Fisher & Paykel Healthcare Limited

(フィッシャー アンド パイケル ヘルスケア社)(ニュージーランド)

製造所: Fisher & Paykel Healthcare Limited

(フィッシャー アンド パイケル ヘルスケア社)(ニュージーランド)