

類別 機械器具 06 呼吸補助器
管理医療機器 一般的名称 再使用可能な人工呼吸器呼吸回路 JMDN 37705000
販売名 蛇管 60CM (新生児用) 直径 15MM

【警告】

<使用方法>

- ◆ リークや損傷が見られる場合、患者さんに使用しないでください。
- ◆ 本品は滅菌処理はされていません。
- ◆ 使用前に、破損・変色・変質等のないことを確認してください。
- ◆ 不注意に踏んだり、硬く重たい物の間に挟まないように注意してください。

【禁忌・禁止】

<使用方法>

- ◆ 本書に記載されていない方法・目的で、本品を操作・使用しないでください。

【形状・構造及び原理等】

1. 構成

蛇管、添付文書

2. 寸法

全長：640mm(コネクタを含む)

3. 材質

蛇管：EPDMゴム

コネクタ部：ポリアセタール

4. 原理

本品自体は作動しません。本品の一方を人工呼吸器の吸気・呼気接続口につなぎ、他方を患者さん側のパーツ(Yピースなど)に接続します。人工呼吸器などの機器からのガス、患者さんからのガスが本品の中を通過します。



【使用目的、効能又は効果】

- * 本品は、人工呼吸器から患者への空気または酸素を多く含むガスの送入に用いる再使用可能な装置です。

【操作方法又は使用方法等】

- ① ピンホールなど損傷や劣化がないことを目視確認してください。
- ② 使用する人工呼吸器などの機器の取扱説明書に従って、機器・呼吸回路などに取り付けてください。

【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

- ◆ チューブを引っ張ったり、ひねらないでください。
- ◆ 患者さんに使用する前に、接続部分や蛇管からリークがないことを確認してください。

【貯蔵・保管及び使用期間等】

保管温度：-40～+70℃

保管相対湿度：10～100%(非結露)

【保守・点検に係る事項】

1. 使用者による保守点検事項

<滅菌・殺菌・消毒方法>

オートクレーブ、煮沸消毒、薬液消毒

【包装】

1本/袋

【主要文献及び文献請求先】

- * アイ・エム・アイ株式会社 救急・教育部
- ** 住所：〒343-0824 埼玉県越谷市流通団地3-3-12
- ** TEL：048-968-4442
- E-mail：support@imimed.co.jp

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者の名称：アイ・エム・アイ株式会社
住所：〒343-0824 埼玉県越谷市流通団地3-3-12
TEL：048-988-4411(代)

- * 製造業者名(国名)：
製造元：Ambu A/S(アンブ社) (デンマーク)
製造所：Ambu A/S(アンブ社) (デンマーク)