



\* 類別 機械器具 06 呼吸補助器

\* 管理医療機器 一般的名称 再使用可能な人工呼吸器呼吸回路 JMDN 37705000

# \* 販売名 **メデュテック人工呼吸器用蛇管**

## 【警告】

直射日光、紫外線が当たらないように注意してください。  
本品は滅菌処理はされていません。使用する前に、洗浄・消毒・滅菌してください。  
使用前に、破損・変色・変質等のないことを確認してください。  
不注意に踏んだり、硬く重たい物の間に挟まないように注意してください。


## 【禁忌・禁止】

リークや損傷が見られる場合、患者さんに使用しないでください。

## \*\*【形状・構造及び原理等】

### 1. 構成

透明チューブ、スパイラルビード、チューブコネクタ

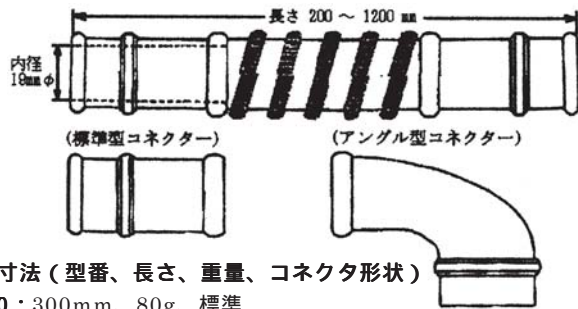

### 2. 寸法 (型番、長さ、重量、コネクタ形状)

- 1030 : 300mm、80g、標準
- 1050 : 550mm、140g、標準
- 1070 : 700mm、180g、標準
- 1120 : 1200mm、310g、標準
- 1021 : 200mm、60g、アングル
- 1051 : 550mm、140g、アングル

### \*\* 3. 原理

本製品自体は作動しません。本品の一方を人工呼吸器の吸気・呼気接続口につなぎ、他方を患者さん側のパーツ(Yピースなど)に接続します。人工呼吸器などの機器からのガス、患者さんからのガスが本品の中を通過します。

## \*\*【使用目的、効能又は効果】

人工呼吸器から患者さんへの空気または酸素を多く含むガスの送入に用いる再使用可能な装置。

## \*\*【操作方法又は使用方法等】

### 1. 特性


使用温度 : - 34.4 ~ + 60.0  
応力繰り返し数 : 200 万回以上

### 2. 使用方法

ピンホールなどが無いことを目視確認してください。  
使用する人工呼吸器などの機器の取扱説明書に従って、機器・呼吸回路などに取り付けてください。

## 【使用上の注意】

チューブを引っ張ったり、ひねらないでください。  
患者さんに使用する前に、接続部分や蛇管からリークの無いことを確認してください。  
接続時はカフ部分を持ってください。

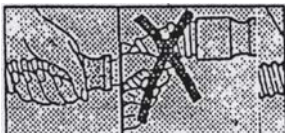

## 【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

保管温度 : - 40 ~ + 70  
保管相対湿度 : 10 ~ 100% (非結露)  
保管場所 : 暑くなく、乾燥した場所  
材質 : シリコン

## 【保守・点検に係る事項】

### 1. 使用者による保守点検事項

#### < 洗浄 >

チューブの劣化を防ぐため、チューブは中性洗剤で洗浄してください。また、消毒する前に水ですすいでください。洗浄後、チューブに劣化が見られないことを確認してください。

#### < 滅菌・殺菌・消毒方法 >

オートクレーブ(134 )、洗浄器(90 )

#### < 滅菌・消毒手順 >

病院で行なわれている標準的な消毒手順に従ってください。洗浄後、蛇管に劣化が見られないことを点検してください。

#### < オートクレーブ時の注意事項 >

オートクレーブを行なう際に一般的に推奨されていることですが、回路に付着している生体から出された物(organic material)を全て適切に洗浄によって除去してください。洗剤の残留物が残らない様に、完全にすすいでください。消毒薬・殺菌薬で蛇管を消毒・殺菌した後にオートクレーブをする場合、十分にすすぎ落とされなかった残留物は、消毒・殺菌によって何度か繰り返して化学薬剤にさらされ、回路にひびを入れたり、穴を開けることがあります。このことは大変重要です。消毒薬や殺菌薬に含まれる一般的な内容物は、水溶性に富んでいます。このことにより、溶液中にdialdehyde(ジアルデヒド)が再生産され、オートクレーブ中にさらに増大されます。回路を正しく取り扱うこともまた重要です。オートクレーブ中に、高温物に直接接触しないこと、オートクレーブ機器内のシェルフに当たらないようにしてください。  
保管する際は、紫外線に被爆させないように注意してください。紫外線は蛇管を劣化させ、長い間にはひび割れや小さな穴を開けることがあります。

## 【包装】

1 本 / 袋

## 【主要文献及び文献請求先】

アイ・エム・アイ株式会社 商品・市場開発部  
住所 : 〒 110-0014 東京都台東区北上野 1-10-14  
TEL : 03-5246-9463  
E-mail : support@imimed.co.jp

## 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者の名称 : アイ・エム・アイ株式会社  
住所 : 〒 343-0824 埼玉県越谷市流通団地 3-3-12

\* TEL : 048-988-4411 (代)

輸入先国名 : ドイツ

製造業者名 : メデュテック・ハンデルスゲゼルシャフト・フェル・  
メディツインテック社  
(MEDUTEK Handelsgesellschaft fur  
Medizintechnik mbH)