



類別 機械器具 74 医薬品注入器
管理医療機器 一般的名称 輸液ポンプ用輸液セット JMDN 35833000

販売名 **メドシステムⅢマルチチャンネルインフュージョンポンプ用輸液セット/アクセサリ
(ベント/ノンベント定量筒セット、スマートサイトバルブポート2個付 28063E)**

【警告】

* **使用方法**

メドシステムⅢ輸液ポンプからカセットを外す際にフリーフローの発生を防止するため、ローラクランプを閉じ、カセットのスライドクランプを引き出して、チューブを閉塞してください。


【禁忌・禁止】

* **使用方法**

再使用禁止。

【形状・構造及び原理等】

スパイク、定量筒/ドリップチャンバ、ローラクランプ、カセット、スマートサイト、ルア等の間が連結管で接続された形状の輸液セットです。

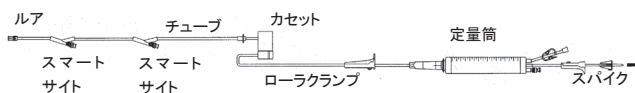

本品はポリ塩化ビニール(可塑剤:フタル酸ジ-2-エチルヘキシル)を使用しています。

【使用目的、効能又は効果】

本品は専用の輸液ポンプに接続して使用され、患者さんへの輸液や、薬液の静注に使用されます。

【操作方法又は使用方法等】

1. 輸液ポンプで1次輸液を供給する場合

- ① 定量筒の上のローラクランプを閉じてください。
- ② スパイクを輸液ボトルに差し込み、輸液ボトルを吊してください。
- ③ 定量筒の上のローラクランプを開けます。定量筒の上のベントキャップを開け、定量筒を最低30mLの液で満たし、定量筒のローラクランプを閉じてください。
- ④ ドリップチャンバを半分だけ液で満たしてください。

【注】 通気が必要とされる輸液ボトルの場合、ベントキャップを開けてください。エアーインレットを通して薬品を注入したり、穴を開けないでください。

- ⑤ カセットのスライドクランプが完全に押し込まれていることを確認してください。
- ⑥ 液がカセットを流れる際に、カセットを反転させたり、軽くたたいて、カセットとスマートバルブポートからエアーを取り除いてください。
- ⑦ カセットのスライドクランプを完全に引き出し、チューブ

を閉塞させてください。ローラクランプを開けてください。

- ⑧ カセットをメドシステムⅢ輸液ポンプに挿入してください(メドシステムⅢ輸液ポンプの取扱説明書を参照してください)。

【注】 カセットが正しく挿入されれば、3回ビープ音がします。

- ⑨ 輸液セットを患者さんの血管につながっている器具に接続してください。
- ⑩ ローラクランプを開け、輸液を開始してください。

2. 自然滴下で輸液を行う場合

- ① 前記①～⑦を実施してください。
- ② 輸液セットを患者さんの血管につながっている器具に接続してください。
- ③ カセットのスライドクランプを押し込んでください。
- ④ ローラクランプで輸液流量を調節してください。

【使用上の注意】

* **重要な基本的注意**

- * ◆ 本品に、輸液セット、延長チューブ、シリンジ等(以下「輸液セット等」という。)を接続する際、輸液セット等の先端形状によっては流液路が開通しない場合があるので、医薬品が注入できない場合は、別の製品に交換すること。特に、シリンジポンプ等による微量注入を行う場合には、十分に留意すること。

◆ 輸液経路は滅菌され非発熱性です。包装に損傷が見られたり、保護キャップが外れている場合は使用せず、廃棄してください。

◆ 病院の基準あるいは24時間毎に交換してください。

◆ 医療スタッフが立ち会わずに薬剤投与に使用される場合、ルアロックのあるセットをバルブに接続してください。

◆ 少量の注入・脂質・血液・血液製剤などを投与・血液を抜き取った・併存不可の薬剤を使用した後・投与間はスマートサイトバルブポートを病院の基準に従って、フラッシュしてください。

◆ 静脈ラインに薬剤を投与する場合、スマートサイトバルブポートの上流を閉塞してください。

◆ 使用する薬剤メーカーの添付文書の記載を守ってご使用ください。

◆ 病院/地域の廃棄基準・法規に則って、廃棄してください。

** ◆ カーディナルヘルス303社製メドシステムⅢ輸液ポンプ(承認番号:21100BZY0036600)にのみ使用可能

です。輸液ポンプに付属している取扱説明書を必ず熟読され、不明な点があれば内容を確認されてから患者さんにご使用ください。

- ◆ スパイクやルアなどには直接手を触れず、無菌的操作を守ってご使用ください。
- ◆ 脂溶性の医薬品ではポリ塩化ビニールの可塑剤であるフタル酸ジ-2-エチルヘキシルが溶出する恐れがありますので、注意してください。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

1. 貯蔵・保管方法

水ぬれに注意し、高温・多湿・直射日光にあたる場所を避けて、常温で保管してください。

2. 使用期限

箱の使用期限欄を参照してください。

STERILE EO



02.2007



使用期限(本例では2007年2月)

【包装】

20本入/箱

【主要文献及び文献請求先】

- * アイ・エム・アイ株式会社 市場開発部
住所：〒110-0014 東京都台東区北上野 1-10-14
TEL：03-5246-9463
E-mail: support@imimed.co.jp

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

- 製造販売業者の名称：アイ・エム・アイ株式会社
住所：〒343-0824 埼玉県越谷市流通団地 3-3-12
TEL：048-988-4411(代)
輸入先国名：米国
- ** 製造業者名：カーディナルヘルス303社
(Cardinal Health 303, Inc.)