



類別 機械器具 48 注射筒  
一般医療機器 一般の名称 汎用注射筒 JMDN 13929001  
販売名 IVACシリンジ

**【警告】**

\* **使用方法**

- ◆ 万一、包装袋の破損や本品に異常が認められた場合、使用しないでください。
- ◆ 使用期限(包装に記載)を過ぎた製品は、使用しないでください。
- ◆ 本品は、医家向け製品です。医師・専門家の指示に従ってご使用ください。

**【禁忌・禁止】**

\* **使用方法**

- ◆ 再使用禁止。
- ◆ 血液・血液製剤には使用しないでください。
- ◆ 本品は、IVACシリンジポンプ700/710/P3000/P6002-TIVA/P6003/P7000専用シリンジです。それ以外には使用しないでください。
- ◆ ご使用に際し、改造等をしないでください。

**【形状・構造及び原理等】**

プライムボリューム: 50mL



**【使用目的、効能又は効果】**

- \* 液体又はガスを注射・注入するか引き抜くために用いる。

\* **【品目仕様等】**

- \*\* 本品は、カーディナルヘルスUK305社製シリンジポンプ専用のシリンジであり、滅菌済みであるのでそのまま直ちに使用できる。

**【操作方法又は使用方法等】**

本品は1回限りの使用で、使用後は廃棄してください。

**【使用上の注意】**

\* **重要な基本的注意**

- ◆ 併用するIVACシリンジポンプの取扱説明書を参照してください。
- ◆ ご使用に際し、無菌的にお取り扱いください。
- ◆ 使用後は、医療廃棄物として国内関連法規に従い、適正に処理してください。
- ◆ 使用する薬剤メーカーの添付文書の記載を守ってご使用ください。

**【貯蔵・保管方法及び使用期間等】**

保管温度: -40~+70℃  
保管環境相対湿度: 10~100%(非結露)  
使用期限: 包材に記載  
製造(LOT)番号: 包材に記載  
滅菌方法: エチレンオキシドガス滅菌  
保管方法: 直射日光・紫外線のあたる所および高温多湿の所を避けて、清潔な場所に保管してください。

**【保守・点検に係る事項】**

使用者による保守点検事項  
ディスプレイは、使用後は廃棄してください。

**【包装】**

150本/箱

**【主要文献及び文献請求先】**

- \* アイ・エム・アイ株式会社 市場開発部  
住所: 〒110-0014 東京都台東区北上野1-10-14  
TEL: 03-5246-9463  
E-mail: support@imimed.co.jp

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】**

- 製造販売業者の名称: アイ・エム・アイ株式会社  
住所: 〒343-0824 埼玉県越谷市流通団地3-3-12  
TEL: 048-988-4411(代)
- \*\* 製造業者名(国名): カーディナルヘルスUK305社(英国)  
(Cardinal Health UK 305,Ltd.)