

再使用禁止 類別 機械器具 05 麻酔器並びに麻酔器用呼吸囊及びガス吸収かん
管理医療機器 一般的名称 単回使用麻酔用呼吸回路 JMDN 37704000
販売名 **ウエストメド 麻酔用ノンリブ回路 (蛇管)**

【警告】


＜使用方法＞

- ◆使用中は常に患者さんの状態を観察してください。
- ◆使用前に破損・変色・変質等のないことを確認してください。

【禁忌・禁止】

＜使用方法＞

- ◆可燃性ガスと併用しないでください。
- ◆再使用しないでください。
- ◆洗浄・滅菌しないでください。ガス滅菌をした場合、危険な残留ガスが残ったり、危険なまでに抵抗が増すことがあります。

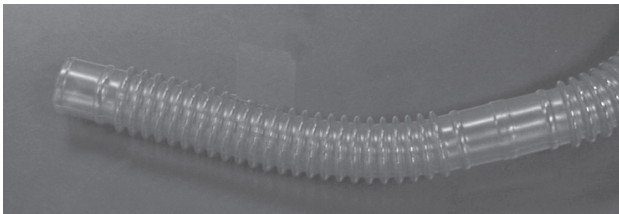

【形状・構造及び原理等】

蛇管、添付文書

＜作動原理＞

一端にフェースマスクを接続し、他方を麻酔器吸気接続口にそれぞれ接続します。ガス流は呼吸バッグによる送気動作ならびに患者の呼吸動作にしたがって、本回路内を通過します。

【使用目的、効能又は効果】

本品は、麻酔器と患者さんの間に接続し、両者間にやり取りされる吸呼気ガスを導くための使い捨て呼吸回路です。

【操作方法又は使用方法等】

- ①パッケージから回路を取り出してください。
- ②麻酔器あるいは蘇生バッグに接続してください。接続部にリークが無いことを確認してください。

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

- ◆紫外線にさらされた場合、ダメージを受けることがありますので、紫外線や直射日光に当たらない場所に保管してください。
- ◆ほこり・塩分・イオウ分を含んだ空気等により悪影響の生じる恐れのない場所に保管してください。化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないでください。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

保管温度：-40～+70℃
保管湿度：10～100% (非結露)
保管場所：暖かい湿気がなく、温度変化の少ない場所に保管。

【保守・点検に係る事項】

1. 使用者による保守点検事項

使用後は廃棄してください。

＜日常点検＞

使用前に、外観の傷みのないことを確認してください。

【包装】

名称 包装単位
30M蛇管 (6インチ接続部付) 青22mm 1ヶ 1巻/箱

【主要文献及び文献請求先】

アイ・エム・アイ株式会社 OR/クリチカルケア部
** 住所：〒343-0824 埼玉県越谷市流通団地3-3-12
** TEL：048-968-4442
E-mail：support@imimed.co.jp

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者の名称：アイ・エム・アイ株式会社
住所：〒343-0824 埼玉県越谷市流通団地3-3-12
TEL：048-988-4411 (代)

*** 製造業者名 (国名)**

製造元：Westmed, Inc. (ウエストメド社) (米国)
製造所：Westmed de Mexico, S.A. de C.V.
(ウエストメド ディメキシコ社) (メキシコ)