

類別 医療用品 05 副木
一般医療機器 一般的名称 成形副木 JMDN 35354000

販売名 アンブ パーフィットエース

【警告】

使用方法

- ◆本品は、医師の指導のもと、この治療法について十分な教育・訓練を受けた方だけが使用できます。医師の指示を受けずに本品を使用した場合、非可逆性の損傷を患者さんに与える可能性があります。
- ◆患者さんに使用する前に、このネックカラーを使用するための臨床的な教育・トレーニングを充分に受けてください。また、本品の取扱方法について、本書を充分に読み、よく理解しておいてください。
- ◆ここに記載されている事はガイドラインです。医学的な処置について定義しているものではありません。使用においては医師の指導・指示に従ってください。
- ◆処置中は常に、頭頸部を中央の位置に保ってください。カラーが正しく取り付けられ、患者さんが固定された後も頭部を保持してください。状況に合わせて、ヘッドイモビライザーなどにより患者さんを更に固定してください。

【禁忌・禁止】

使用方法

- ◆再使用しないでください。


【形状・構造及び原理等】

1. 構成

本体×1、
添付文書×1

安全ボタン

ラッチ

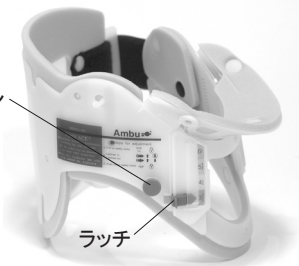

2. 原理

頸椎や脊髄の保護や損傷

を防止するため、頭頸部を本品に固定することで、頭頸部を中央位置に維持し、前後左右に曲ることのないようにします。同時に脊髄のひねり・圧迫による、生理学的な損傷、虚血性の損傷が脊髄に加わることを防ぎます。

【使用目的、効能又は効果】

- * 本品は、損傷した身体部位を固定するために用いる器具です。身体に合うよう予め成形されています。

【品目仕様等】

カラーサイズ：16段階調節

【操作方法又は使用方法等】

1. 操作方法

頸椎や脊髄の保護や損傷を防止するため頭頸部を固定(サイズはアンブパーフィットカラーのサイズ3~6に相当し、患者さんにあわせて16段階で調節可能)してください。

①救護をする方は手を使って患者さんの頭頸部を安定させ、丁寧に中央の位置にしてください(写真1)。

注：万一、この処置の中で、何らかの抵抗を感じたり、患者さんの不快感が増加する場合、脊髄損傷などがある、あるいは疑われるときにとられる所定の固定処置法に従ってください。

②頭頸部が安定したら、第二の救護者が、本品を以下の方法でサイズを患者さんに合わせてから、患者さんに取り付けてください。患者さんの頸部が伸び過ぎないように注意してください。

③患者さんの顎の下から患者さんの肩までの距離を指で測定してください(写真2)。











④上記で測定した距離とカラーのサイズ線とプラスチックの下(フォーム部ではありません)の部分との距離を比較してください(写真3)。

⑤パーフィットエースは出荷時点でサイズ3にセットされています。サイズを大きくする場合、安全ボタンを上へ引き上げて安全のためのロックをはずしてください(写真4)。

⑥カラーサイズを調節してください。サイズ3からサイズ6まで16段階で調節できます。上記③の指で測定した距離になるまでカラーを広げてください(写真5)。

⑦安全ボタンを押し下げて安全のためのロックを固定してください(写真6)。

⑧サイズを再調節する場合、安全ボタンを引き上げ(写真7)、ラッチをOUT(外)側に押し解除(写真8)してから、サイズを調節してください(写真9)。サイズが決まったら、ラッチをIN(内)側に押し(写真10)、安全ボタンを下側に押し下げて、安全のためのロックを固定してください(写真11)。

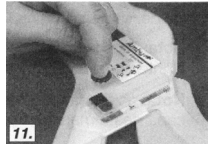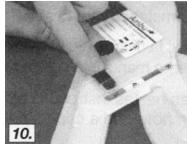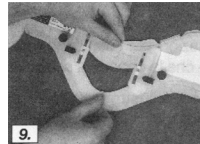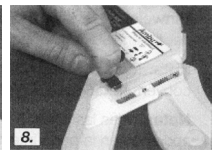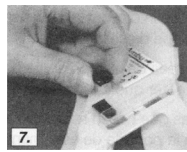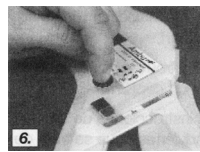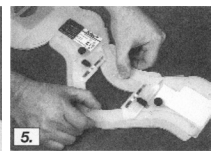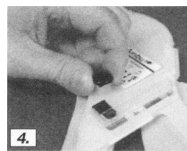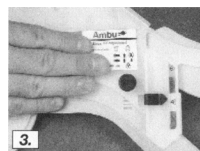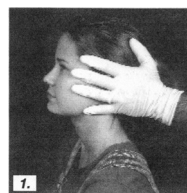

2. カラーの組み立て(写真12)

カラーの気管切開口部を手で持ち、人差し指を顎用ピース(センターリベット上)のフォーム側に、親指を顎用ピースの反対側に当ててください。顎用ピースを裏側から正面側に回してください(写真12、13)。これで顎用ピースが正しい位置にセットされます。


3. 適用

固定用ネックカラーを使用するには、2人の人員が必要です。第一番目の救護者がspread finger法(「写真14」)により、頭部を保持して、頭頸部を中央の位置にして、動かないように注意してください。

- ① 第二番目の救護者がカラーを患者さんの胸、顎に当ててください。カラーは特別なことをしなくても、患者さんの肩と胸骨の上に乗るはずです(写真15)。患者さんの顎が中央の位置で、顎用ピースにしっかりとのることを確認してください(写真16)。
- ② カラーの正面を持ちながら、カラー後部を首の後ろ側に回し、ベルクロストラップをカラーの正面側に回してください(写真16)。
- ③ ベルクロストラップを必要な長さに調節して固定してください(写真17)。
- ④ 貴施設の手順に従ってカラーサイズを調節ください。

4. 仰臥位での使用

患者さんが仰臥位の場合、カラー後部を患者さんの首の後ろに均等に滑り込ませてください(写真18、19)。顎に顎用カラーを当てた(写真20)あと、片手でカラーを保持し、もう一方の手でベルクロストラップを締めてください(写真21)。

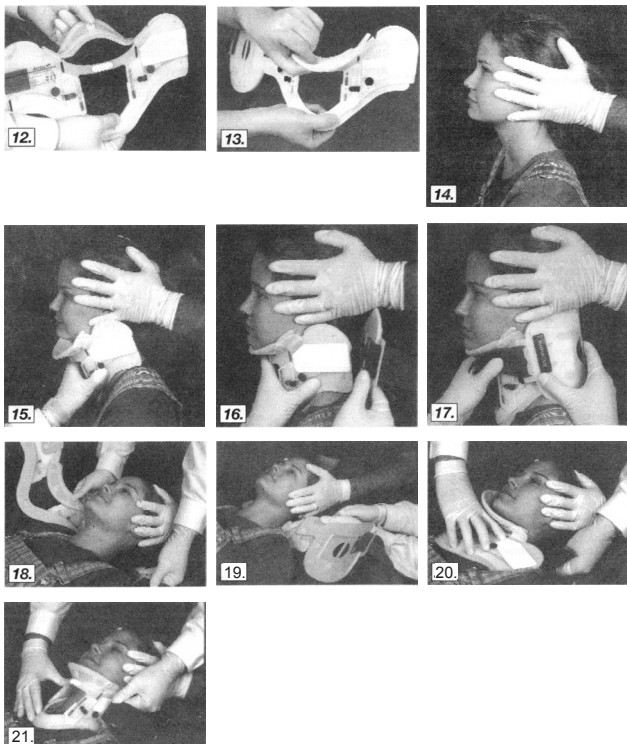

【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

- ◆ 固定用ネックカラーは、患者さんの固定処置の一部となっています。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

保管温度：常温

【保守・点検に係る事項】

本品はディスプレイブルのため、使用後は廃棄してください。

【包装】

1個入り：(本体×1、添付文書×1)／袋

20個入り：{(本体×1、添付文書×1)×20個}／箱

【主要文献及び文献請求先】

- * アイ・エム・アイ株式会社 救急・教育部
- ** 住所：〒343-0824 埼玉県越谷市流通団地3-3-12
- ** TEL：048-968-4442
- E-mail: support@imimed.co.jp

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者の名称：アイ・エム・アイ株式会社
住所：〒343-0824 埼玉県越谷市流通団地3-3-12
TEL：048-988-4411(代)

- * 製造業者名(国名)：
製造元：Ambu A/S(アンブ社)(デンマーク)
製造所：Ambu Ltd(アンブ社)(中国)