



* 類別 機械器具 13 聴診器

* 一般医療機器 一般的名称 機械式聴診器 JMDN 13755000

販売名 **タイコス ユニスコープ聴診器シングルヘッド**

【禁忌・禁止】

* 再使用しないでください。

**** 【形状・構造及び原理等】**

1. 構成

聴診器、添付文書


2. 寸法及び重量

チューブ：71cm

ダイヤフラム：4.7cm (大人用) 3.3cm (小人用)

**** 3. 原理**

チェストピース (集音部) で振動 (あるいは音) を集め、チューブを介してイヤピースに伝えます。

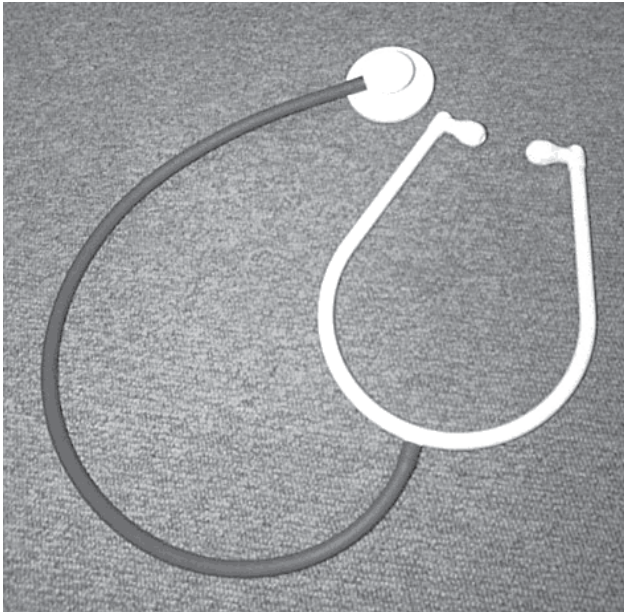

【使用上の注意】

疾患を持った患者さんの診断や血圧測定で、聴診器は、最も重要な機器です。聴診をうまく行うための鍵は、様々な音や雑音の特性を正しく聞き分け、解釈し、識別する能力です。
ダイヤフラムに加える圧を変化させることにより、様々な音が聴診できるようにしてください。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

常温常湿による保管。

【保守・点検に係る事項】

1. 使用者による保守点検事項

Disposable (使い捨て) です。再使用しないでください。

【包装】

* 1個 / 袋

【主要文献及び文献請求先】

* アイ・エム・アイ株式会社 商品・市場開発部

* 住所：〒110-0014 東京都台東区北上野1-10-14

* TEL：03-5246-9463

* E-mail：support@imimed.co.jp

*** 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】**

* 製造販売業者の名称：アイ・エム・アイ株式会社

住所：〒343-0824 埼玉県越谷市流通団地3-3-12

* TEL：048-988-4411 (代)

* 輸入先国名：米国

* 製造業者名：ウェルチ・アリン社

WelchAllyn

**** 【使用目的、効能又は効果】**

心臓及び肺の音を聴くために用いる機械式の聴取装置をいう。通常、リスニングヘッドに膜があり、この膜が分岐Y字型チューブによってイヤーオリーブ (ユーザーの耳に挿入する) を備えたヘッドギアに接続されている。通常、以下の2つの形式がある。1. 臨床・病棟活動に用いる汎用聴診器。2. 心臓専門医が使用する強化聴診器。

**** 【操作方法又は使用方法等】**

聴診する部屋を、静かで、気が散ることのない環境にしてください。患者さんを快適な状態におき、衣服を脱いでいただき、ユニスコープ聴診器と皮膚を正しく接触させてください。



仰臥位



左横臥位



座位