

類別 機械器具 50 開創又は開孔用器具  
一般医療機器 一般的名称 挿管用喉頭鏡 JMDN 70948009  
販売名 WA ディスポ喉頭鏡

**【警告】**


**使用方法**

- ◆ 訓練を受けた方だけが、患者さんに使用ください。
- ◆ 記載外のアクセサリやパーツを使用しないでください。
- ◆ ライトソースは再使用できますが、ブレードはディスポーザブルです。

**【禁忌・禁止】**

**使用方法**

- ◆ ブレードは再使用しないでください。

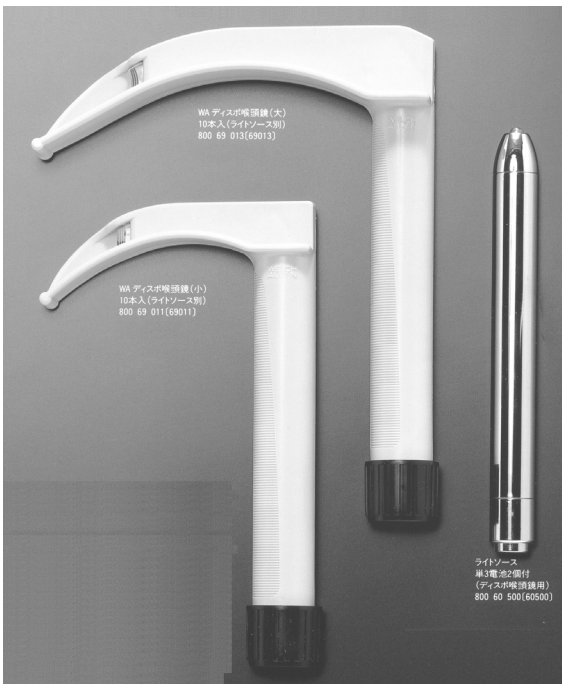

**【形状・構造及び原理等】**

**1. 構成**

本体、ライトソース、添付文書

**2. 原理**

ライトソース内に1.5V 乾電池2本が内蔵され、ハンドル／ブレード内にライトソースが装着されます。ハンドル／ブレードのハンドル部のキャップを回転させる事により、ランプが発行し、光がブレード先端まで送られます。これにより喉頭を照射します。

**【使用目的、効能又は効果】**

本品は口腔及び喉頭を光で照らし患者へ気管内チューブを挿入する際に使用される喉頭鏡である。喉頭及びその周辺の観察、診断にも用いる。

**\* 【品目仕様等】**

**安全性規格**

JIS T 0601-1: 1998「医用電気機器 第1部:安全に関する一般的要求事項」に適合

**【操作方法又は使用方法等】**

**1. 操作方法**

- ① ライトソース(モデルNo. 60500)を本体に入れます。
- ② キャップを、時計回りに回し、カチッと止まる位置で止めます。
- ③ さらに、時計回りに回すと、2番目に止まる位置で、ランプが点灯します。
- ④ 反時計回りに、はじめの停止位置まで底部カバーを回すと、ランプが消灯します。

**【使用上の注意】**

**\* その他の注意**

- ◆ 修理ではIMI(株)が認定するサービスマンに連絡してください。

**【貯蔵・保管方法及び使用期間等】**

常温常湿による保管。

**【保守・点検に係る事項】**

**1. 使用者による保守点検事項**

**<ブレード>**

ブレードはエチレンオキサイドなどを使用して滅菌できません。滅菌した後は、使用前に喉頭鏡が完全に乾燥し、喉頭鏡内部にも滅菌液が残っていないことを充分確認してください。

**<ライトソース(モデル番号 60500)>**

滅菌できません。ブレードの滅菌前に取りはずしてください。



**<電池(バッテリー)交換>**

- ① ハンドルの底部カバーを反時計回りに回して緩め、電池をはずしてください。
- ② 適切な電池と交換してください。  
使用できる乾電池は以下となります。
  - ・アルカリ乾電池
  - ・亜鉛-炭素乾電池
  - ・再充電可能なNi-Cd乾電池
- ③ 適切なサイズの電池を入れた後、底部カバーを閉めてください。

### <充電式Ni-Cd電池の廃棄>

国内法規を遵守してください。

### <予備電球(ランプ)交換>

- ①上部カバーを反時計回りに回すと電球(ランプ)が取り外せます。取りはずす際は電球(ランプ)が完全に冷えてから、指で押してください。
- ②電球(ランプ)を予備電球(#036000)と交換します。
- ③予備電球(ランプ)がしっかり締まっていることを確認し、上部カバーを時計回りに回します。



**注意:** 組立後、予備電球(ランプ)のガラス管球に汚れがないことを確認してください。必要に応じ、アルコールを浸み込ませた綿棒で清拭してください。ガラス管内は、効率や照度を向上するために、加圧されています。ガラスを擦ったり、ひっかいたりしないでください。廃棄時は注意して取り扱ってください。

### <テスト>

喉頭鏡本体のクリーニング・消毒・滅菌及びライトソースの電池、電球(ランプ)交換後、必ず以下のテストをしてください。

- ①正常に電球(ランプ)が点灯することを確認します。
- ②電球(ランプ)が点灯しなかったり、点滅する場合、電球(ランプ)と電池を点検します。
- ③常に予備電球、電池、交換部品を備えておいてください。
- ④問題が発生した時は、IMI(株)にご連絡ください。

### 【包装】

本体：(1個/袋×10)/箱

ライトソース：1個/箱

### 【主要文献及び文献請求先】

- \*\* アイ・エム・アイ株式会社 救急・教育部
- \*\* 住所：〒343-0824 埼玉県越谷市流通団地3-3-12
- \*\* TEL：048-968-4442
- E-mail: support@imimed.co.jp

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者の名称：アイ・エム・アイ株式会社

住所：〒343-0824 埼玉県越谷市流通団地3-3-12

TEL：048-988-4411(代)

\*\* 製造業者名(国名)：

製造元：Welch Allyn, Inc.(ウエルチ アレン社)(米国)

製造所：Welch Allyn Limited(ウエルチ アレン社)(アイルランド)

**WelchAllyn**